



Vezetés + mobilitás 2017.10.16.

Tippek a progresszív lencsék kényelmesebb viselésére.

Bárki gyorsan hozzászokhat a tökéletesen beállított progresszív lencsékhez.

Három láthatatlan zónával rendelkeznek, amelyek egymásba átmennek, és egy lencsével éles látást biztosítanak közelre és távolra is. A progresszív lencsék a csúcsmínőségű optikai technológia speciális területét jelentik. Amikor a szemüveget az egyénhez igazítják, akkor viselője igen elégedett lesz. Ugyanakkor időként egy kis gyakorlás is szükséges ahhoz, hogy hozzászokjunk a progresszív lencsékhez.

A > [progresszív lencsék](#) jelentik a lehető legjobb megoldást a tökéletes látás fenntartására bármely távolság esetén. Azok, akik hozzászoknak a progresszív lencsékhez, már nem szívesen mondanak le ezekről a csúcstechnológiájú termékekről. Ugyanakkor a viselőiknek bizonyos dolgokkal tisztában kell lenniük, hogy a lehető legegységesebbek legyenek a progresszív lencsékkel ellátott szemüvegeikkel.

Alapvető követelmény az optikussal folytatott szaktanácsadás és beszélgetés

A legfontosabb, hogy személyesen beszéljünk el egy optikussal. Mivel minden ember különböző személyiség, a szeme és a látási szokásai is egyediek. Éppen ezért egy jó optikus pontos vizsgálatot fog végezni. Például meg fogja kérdezni, hogy mi a munkája és a hobija, hogy képet alkosson a látási szokásairól. A testtartása és a fejének az alakja szintén fontosak.

A pontos szemvizsgálat fontos szerepet játszik a progresszív lencsék tökéletes beállításában. Nem csak a két szemet méri fel külön-külön, hanem a lencsék erősségének a meghatározásához a két szemes látást (binokuláris látás) is vizsgálják. Csak mindezek segítségével lehet a megfelelő olvasási segédeszközt és a megfelelő lencseerősséget jól meghatározni.

Az úgynevezett centrálási eljárás is igen lényeges. A pupilla pontos középpontjának a beállítása

ZEISS Online Látásellenőrzés

Milyen jól látja a kontrasztot és a színeket? Itt gyorsan és egyszerűen ellenőrizheti látását!

Kezdje el a Online Látásellenőrzés!

Az először progresszív szemüveget viselőknél időre van szükségük, hogy megszokják a szemüveget.

De ne aggódjon: A modern progresszív lencsék sikerének az aránya manapság igen magas. A technológia folyamatosan fejlődik. Ugyanakkor fontos az is, hogy a szemüveg viselője hozzászokjon a progresszív lencséihez. A szemnek és az agynak meg kell tanulnia kiegyenlíteni a progresszív lencsék különböző törőerőit. Például: amikor a szemüvegviselő felmegy a lépcsőn, a progresszív szemüvege alsó részén fog átnézni. Viszont pontosan ezt a részt állították be a körülbelül 40 centiméteres olvasási távolságra. A lépcsőfokok persze, méretüktől függően, jóval távolabb vannak. Ezért azokat nem fogja tisztán látni. De itt a jó hír: a látóérzék, ahogy tudjuk is, egy igen bonyolult, de szerencsére nagyon könnyen alkalmazkodó rendszer. Rövid időn belül képes megismerni az új feltételeket és alkalmazkodik is azokhoz. Lépcsőn való közlekedéskor a szemüvegviselő egyszerűen lejjebb billenti a fejét.

Mihez kell, hozzászoknom a progresszív lencsék viseléséhez?

- Homályosság és kisebb torzítások a lencsék széleinél.
- Mozgassa gyakrabban a fejét, és mozgassa ritkábban a szemét, különösen kis távolságok nézésekor, mivel a közel látómező csak a lencsék alsó felében található.
- Összességében meg kell szoknia az egyéni látómezőket és azok helyzetét a szemüvegben: az alsó részen csak közelre lát tisztán. Ha a távolba néz, a lencsék felső részét kell használnia, különben a látott kép homályos lesz.

Mindezek a mellékhatások teljesen természetesek, amelyek rövid idő alatt lecsökkennek, és később annyira hozzászokik ezekhez, hogy úgy fogja érezni, teljesen eltűntek. Ugyanakkor fontos megjegyeznünk: Az új [progresszív szemüveget](#) rögtön az elejétől fogva naponta kell viselnie, lehetőség szerint reggeltől estig. Azt is meg kell említenünk, hogy a kor nem számít. Ugyanakkor elmondhatjuk a progresszív lencséről, hogy: minél hamarabb kezdi a viselését, annál könnyebben szokik hozzá. Sokat segít, ha a progresszív lencsék viselését a lehető leghamarabb elkezdjük, akkor, amikor a közeli látás korrigálása még csekély mértékű. A hozzászokás időszaka sokkal zavartalanabb, mivel a zónák közötti átmenetek még nagyon enyhék.

Amennyiben az új progresszív lencsék nem kényelmesek a két-háromhetes hozzászokási időszak után sem, az optikusa örömmel nyújt Önnek további segítséget.

ZEISS Vizuális Profilom

Határozza meg most személyes vizuális szokásait, és találja meg személyre szabott szemüveglencséjét.

Nézze meg Vizuális Profilját most!



Keressen ZEISS Optikust a Környékén

Utca, város



Kapcsolódó cikkek




A legjobb szemüvegek autóvezetéshez – a biztonságos megérkezés érdekében

Azonban mi az, amit az autóvezetéshez használt szemüveg megvásárlásakor figyelembe kell venni?

Vezetés + mobilitás 2017.10.16.

Tags: , Progresszív lencsék

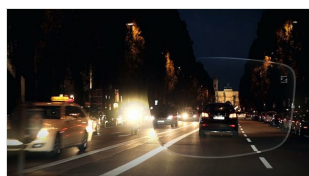

Szemüveglencse-fejlesztés vezetéshez

Bepillantás: így zajlott a ZEISS DriveSafe fejlesztése

Vezetés + mobilitás 2017.10.16.

Tags: , Progresszív lencsék



Szemüveglencsék a pihentetőbb vezetéshez

Így tehetik a ZEISS lencsék a vezetést biztonságosabbá és kevésbé stresszessé.

Vezetés + mobilitás 2017.10.16.

Tags: , Progresszív lencsék





Lásson egyszerűen jobban progresszív lencsékkel

A ZEISS progresszív lencse választéka tökéletes megoldás – még azok számára is, akik első alkalommal viselik

Vezetés + mobilitás 2017.10.16.

Tags: Progresszív lencsék

Kapcsolódó termékek

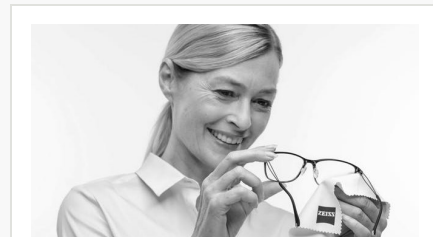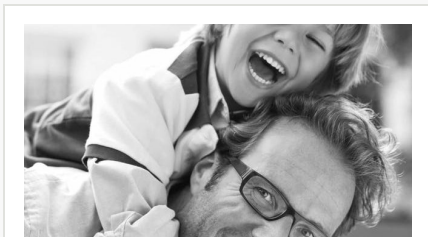

Szemüveglencse-rétegek

Nagyszerű külső és kényelmesebb látás.

[Bővebben](#)

Egy progresszív szemüveg bármilyen tevékenységénél remekel

Így ön végre ismét jól lát. Bármilyen távolságra.

[Bővebben](#)

Lásson jól tartós lencsékkel.

ZEISS tisztítómegoldások szemüvegekhez.

[Bővebben](#)



Bővebben

A látás részletesen
Egészség + megelőzés
Életmód + divat
Vezetés + mobilitás
Sport + szabadidő
Munka + magánélet

Segítség a választáshoz

Távoli- + olvasószemüveg
Progresszív lencsék
Napszemüveg
Irodai szemüveg
Sportszemüveg
Gyerekszemüveg
Felületkezelések
Kontaktlencsék
Tisztító eszközök
Az optikában

Szolgáltatások

Eredetiségvizsgálat
ZEISS szolgáltatások
ZEISS vizuális profilom
Online látásellenőrzés

Optikusoknak

Tartsa nyitva szemét, amikor üzleti partnert választ
Berendezések + technológiák
ZEISS szemüveglencsék
ZEISS tisztító eszközök
PartnerNet
VisuStore